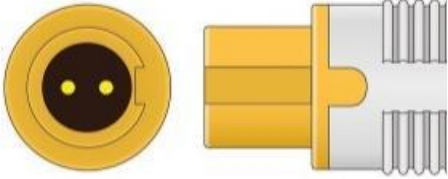


IMAGEN: 	SENSOR DE TEMPERATURA	
	PRODUCTO	
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	TMR-AS
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0019686
	FABRICANTE	UNIMED MEDICAL SUPPLIES
		RIESGO IIA
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado al monitoreo de la temperatura corporal de los pacientes.	
CARACTERÍSTICAS	Las sondas de temperatura son reusables y diseñadas para uso con monitores de diferentes tecnologías, compatibles según tecnología y conector.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Conector	Redondo 2 Pin
	Compatible con:	monitores MINDRAY REUSABLE para Mindray Series: Beneview T5, T8, DPM6, DPM7, iMEC, Umec.
	Longitud del cable:	1.5 M
	Peso:	0.27Kg
	Autoclavable:	No
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU	
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada	
PRESENTACIÓN	Unidad.	
PRECAUCIONES	Limpieza: Los sensores deben ser limpiados con un detergente suave y agua para remover el exceso de la biocarga y mejorar la efectividad de la desinfección y esterilización. Evitar el contacto con solventes fuertemente aromáticos, clorados, cetonas, éter o éster. La inmersión prolongada en alcoholes o solventes orgánicos, soluciones detergentes o soluciones altamente alcalinas pueden causar que el vinilo pierda flexibilidad. Los plugs de las sondas no deben ser sumergidos. Desinfección: Bajo Nivel: Cidex / glutaraldehído Alto Nivel: Cidex / glutaraldehído, hipoclorito diluido a 5000 ppm o alcohol isopropílico al 70% Nunca inserte las sondas de temperatura series T en horno.	