

IMAGEN: 		PRODUCTO	SENSOR DE SPO2 PINZA ADULTO																										
		MARCA	UNIMED																										
		REFERENCIA	U403-117																										
		REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004317-R1																										
		RIESGO	IIA																										
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo diseñado para determinar la concentración de oxígeno arterial aproximada, continua y no invasiva, y la frecuencia de pulso cardiaco, es utilizado como accesorio de los monitores de signos vitales o pulsioxímetros. disponible para neonato, pediátrico y adulto.																												
CARACTERÍSTICAS	El sensor de SpO2 está diseñado para cumplir las especificaciones de fabricante original de equipos, es importante asegurarse que el número de sensor es el apropiado para la tecnología particular de pulsioxímetro seleccionada																												
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<table><tr><td>Conector</td><td>DB9, Modulo Trusignal</td></tr><tr><td>Compatible con:</td><td>monitores GE, Tecnología TruSignal</td></tr><tr><td>Diámetro del Cable:</td><td>4.0mm</td></tr><tr><td>Longitud del cable:</td><td>1.0m</td></tr><tr><td>Rango de Medición:</td><td>69%-100%</td></tr><tr><td>Precisión:</td><td>±2</td></tr><tr><td>Rango de frecuencia de pulso:</td><td>20-250bpm, Precisión ± 3 dígitos</td></tr><tr><td>Conector a paciente</td><td>Dedo</td></tr><tr><td>Tamaño del paciente:</td><td>Adulto (peso mayor a 30Kg)</td></tr><tr><td>Peso:</td><td>0.54kg</td></tr><tr><td>Autoclavable:</td><td>No</td></tr><tr><td>Temp. Operación:</td><td>5°C a 45°C</td></tr><tr><td>Humedad operación:</td><td>0 a 80% No condensada</td></tr></table>			Conector	DB9, Modulo Trusignal	Compatible con:	monitores GE, Tecnología TruSignal	Diámetro del Cable:	4.0mm	Longitud del cable:	1.0m	Rango de Medición:	69%-100%	Precisión:	±2	Rango de frecuencia de pulso:	20-250bpm, Precisión ± 3 dígitos	Conector a paciente	Dedo	Tamaño del paciente:	Adulto (peso mayor a 30Kg)	Peso:	0.54kg	Autoclavable:	No	Temp. Operación:	5°C a 45°C	Humedad operación:	0 a 80% No condensada
	Conector	DB9, Modulo Trusignal																											
	Compatible con:	monitores GE, Tecnología TruSignal																											
	Diámetro del Cable:	4.0mm																											
	Longitud del cable:	1.0m																											
	Rango de Medición:	69%-100%																											
	Precisión:	±2																											
	Rango de frecuencia de pulso:	20-250bpm, Precisión ± 3 dígitos																											
	Conector a paciente	Dedo																											
	Tamaño del paciente:	Adulto (peso mayor a 30Kg)																											
	Peso:	0.54kg																											
	Autoclavable:	No																											
	Temp. Operación:	5°C a 45°C																											
	Humedad operación:	0 a 80% No condensada																											
MATERIAL / COMPOSICIÓN	TPU																												
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada																												
PRESENTACIÓN	Unidad.																												

RECOMENDACIONES	<u>Aplicación:</u> - El sensor y el cable deben ser limpiados usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Ubique el sensor en el dedo índice asegurando que el dedo esté completamente insertado y que la punta del dedo descansa sobre la barrera que hay dentro del sensor. - Posibles lugares alternos para ubicar el sensor son: un pulgar de tamaño pequeño, los dedos medio, anular y meñique o el dedo pulgar del pie. - Asegúrese que la uña esté localizada bajo la barrera que hay dentro de la pinza del sensor. - El sensor no debe ser ubicado en el mismo brazo donde se encuentre el brazalete de NIBP, el catéter arterial o la línea intravascular. - Remueva todo el esmalte, esto puede afectar la precisión. - No utilice el sensor dentro o cerca al equipo de MRI. - Evite tener fuentes de luz intensa cerca del sensor. - Para uso de largo plazo, el lugar de medición debe ser cambiado cada 4 horas para garantizar la integridad de la piel de los pacientes. - En paciente inquieto (de movimiento excesivo), utilice los sensores tipo funda de silicona (soft), de correa, o sensores multi-sitio de Unimed Medical Supplies Inc., con el fin de asegurar el sensor al paciente. <u>Precauciones:</u> - Los sensores están diseñados para uso con monitores específicos. - El operador es responsable del chequeo de la compatibilidad del monitor, el sensor y el cable antes de su uso. - Componentes incompatibles pueden resultar en precisión degradada y mal desempeño. - Evaluar la precisión del sensor utilizando el probador funcional o simulador de oximetría. - Consultar las instrucciones de operación concernientes al equipo y los accesorios relacionados antes de la operación del equipo para asegurar su compatibilidad. - Equipos portátiles o de comunicación RF móvil pueden afectar el desempeño del dispositivo. - La disposición final del sensor debe cumplir con la regulación local de desechos. - No use agentes abrasivos o productos químicos except alcohol isopropílico al 70%. - No irradie, use autoclave, no empape o sumerja el sensor en ningún tipo de solución. -
------------------------	--