

IMAGEN: 	PRODUCTO EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2	
	MARCA UNIMED	
	REFERENCIA U708M-87	
	REGISTRO SANITARIO 2019DM-0004317-R1	
	RIESGO IIA	
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico indicado para hacer la interconexión eléctrica entre el equipo biomédico y el sensor de saturación de oxígeno arterial durante el monitoreo	
CARACTERÍSTICAS	Indicado para el uso en monitoreo continuo no invasivo de saturación de oxígeno arterial y pulso cardiaco. Son compatibles con sensores de la mayoría de marcas de monitores de paciente y pulsoxímetros	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Conector	Redondo 8 pines / Masimo LNCS DB9 pin
	Compatible con:	Philips; M8105A MP5, M8105AS, Suresigns VS2, Suresigns VS3, Heartstream XL, Intellivue FAST- Spo2, Intellivue MP70, M1020B, M2601A, M3001A, M3001A A03, M3001A A03C06, M3001A A03C12, M3001A A03C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102a, M8102A MP2, VM4
	Longitud del cable:	2.2M
	Diámetro del cable	4.0mm
	Peso:	0.54kg
	Autoclavable:	No
	Temp. Operación:	5°C a 45°C
	Humedad operación:	0 a 80% No condensada
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU	
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada	
PRESENTACIÓN	Unidad.	
RECOMENDACIONES	Mantenimiento: - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución.	

Precauciones:

- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.
- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.
- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo de oximetría podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.
- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.
- Siempre refiérase al manual de operador del módulo de oximetría para instrucciones completas o información adicional.
- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.